



Informationsblatt zum Umgang mit Covid 19

Um Sie und Ihre Patienten zu schützen und Ihnen den Umgang mit dem Atemtest zu erleichtern, möchten wir Ihnen folgende Informationen zum sicheren Umgang mit unseren Geräten geben.

- Bitte nach jedem Test das Gerät mit einem alkoholfreien Desinfektionstuch desinfizieren, z.B. Microbac Tissues.
- Für jeden Patienten bitte ein separates T-Stück verwenden
- Die T-Stücke nach Beendigung des Testes mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln nach Herstellerangaben aufbereiten
- Verwendung von SafeBreath Mundstücken mit Viren- und Bakterienfilter
Effizienz bei Bakterien: 99,97 % *
Effizienz bei Viren: 99,67 % *

*) unabhängige Studie:

Public Health England Microbiology Services (HPS-Report-Nr. 15/015: "An Evaluation of Filtration Efficiencies Against Bacterial and Viral Aerosol Challenges")